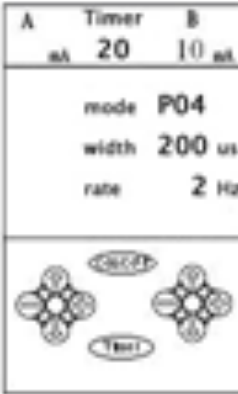
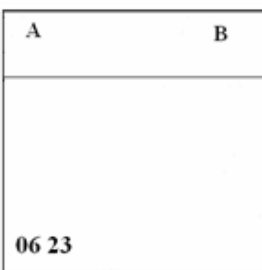


Zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten für Elektrostimulationsgerät DIGITAL FIT URO 1200 zur Inkontinenzbehandlung

Display TENS und TENS-EMS 1200	Funktion	Bezeichnung	Cursor Position neben	Einstellungen am Funktions-Button
	Wesentliche separat für Kanal A und B einzustellende Parameter	Betriebsart	Mode	"+" erhöht "-" verringert Es können die Inkontinenz Programme 01 – 16 ausgewählt werden.
		Intensität	mA	"+" erhöht "-" verringert Einstellung nur allmählich innerhalb von 0 – 80 mA anpassen.
	Behandlungsdauer	Behandlungsdauer einstellen	--	Fest eingestellt auf 20 Minuten
	Therapie-speicher z.B. steht 06 23 für 62 Stunden und 30 Minuten	Abrufen der kumulierten Therapiedauer	Mode bzw. mA	Beide "+" buttons unabhängig von der Stellung des Cursors gleichzeitig für 5 Sekunden drücken
		Rückkehr zum normalen Betrieb	Mode bzw. mA	Beide "+" buttons unabhängig von der Stellung des Cursors, erneut gleichzeitig für 5 Sek. drücken
		Rücksetzen der kumulierten Therapiedauer	Mode bzw. mA	Beide "-" Buttons gleichzeitig für 5 Sekunden Drücken